

IHR PARI SINUS2

KANN NOCH MEHR!

Mit dem PARI LC SPRINT Vernebler können Sie den PARI SINUS2 für die Therapie der unteren Atemwege bzw. zur Befeuchtung aufrüsten. **Die Rund-um-Therapie für die oberen und unteren Atemwege!**



Weitere Informationen finden Sie in unseren Anwendervideos unter www.pari.com



AUF EINEN BLICK!

PARI SINUS2 ist in Deutschland verschreibungs- und erstattungsfähig!



PARI SINUS2
mit PARI LC SPRINT SINUS Vernebler

Bestell-Nr.: 128G1000
PZN: 13987887



PARI LC SPRINT SINUS2 Year Pack
PARI LC SPRINT SINUS Vernebler,
PARI SINUS Schlauchsystem und Filter

Bestell-Nr.: 023G8310
PZN: 14420881



PARI MONTESOL Nasendusche
Füllvolumen: 250 ml

Bestell-Nr.: 177G1010
PZN: 00169934



PARI MONTESOL Nasenspülung
250 ml konzentrierte Lösung
für 30 Anwendungen

Bestell-Nr.: 177G1020
PZN: 01075477



PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation
Moosstraße 3
82319 Starnberg, GERMANY
Tel.: +49 (0)8151 279 0
Fax: +49 (0)8151 279 101
E-Mail: info@pari.de
www.pari.com



PARI SINUS2

VERNEBLERTHERAPIE



ZUR BEHANDLUNG EINER ENTZÜNDUNG
DER NASENNEBENHÖHLEN

Tipps zur Verneblung und Hygiene

www.pari.com

028D0109-A-2019-04

TIPPS ZUR ANWENDUNG

Führen Sie die Therapie nicht bei verstopfter Nase durch.

Bei Erkältungskrankheiten kann Ihnen im Vorfeld die Anwendung der PARI MONTESOL Nasendusche helfen.



1. Waschen Sie sich vor jeder Anwendung gründlich die Hände.



2. Stecken Sie den orangenen Düsenaufsatz mit leichtem Druck bis zum Anschlag auf das Verneblerunterteil und verschließen Sie den Vernebler mit Hilfe des Vernebleroberteils.



3. Verbinden Sie das Winkelstück und das Nasenansatzstück mit dem Vernebler.



4. Füllen Sie die Inhalationslösung ein und schließen Sie den Deckel.




5. Stecken Sie das passende Ende eines Schlauches unten an den Vernebler. Das passende Ende des anderen Schlauchs verbinden Sie mit dem Vibrationsanschluss und stecken diesen von oben auf den Vernebler. Das jeweils andere Ende der Schläuche stecken Sie in den Kompressor.



6. Setzen Sie sich aufrecht und entspannt hin. Verschließen Sie eine Nasenöffnung mit dem Nasenstöpsel und setzen Sie den Vernebler an die andere Nasenöffnung. Schalten Sie jetzt den Kompressor ein.



7. **Wichtig für die Therapie:** Gaumensegel schließen! Um Ihr Gaumensegel zu schließen, sprechen Sie so lange wie möglich die Silbe „ing“ aus (ausgesprochen wie die zweite Silbe von Peking). Nach einer kurzen Atempause wiederholen Sie dies so oft, bis die Therapie abgeschlossen ist.

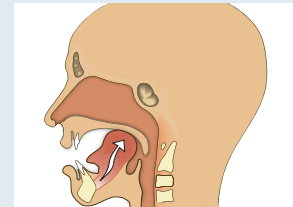

Tipp: Kontrolle für das Schließen des Gaumensegels

Das Gaumensegel ist geschlossen, wenn die Nasenflügel leicht vibrieren und die Luft durch die Öffnung im freien Nasenloch ausströmt.


8. Nach der Hälfte der Verneblungszeit (nach 2–3 Minuten) wechseln Sie die Nasenöffnung und fahren Sie wie unter 6 fort.
9. Schalten Sie nach beendeter Verneblung den Kompressor aus und ziehen Sie die Schläuche vom Vernebler ab. Schalten Sie das Gerät für ein paar Minuten wieder ein, um die Schläuche zu trocknen.



So reduzieren Sie unangenehmen Druck in der Nase
Stülpen Sie den Nasenstöpsel nach außen und schneiden Sie die Spitze an der vorgegebenen Kante mit einer Schere ab. Anschließend stülpen Sie den Nasenstöpsel wieder zurück.

TIPPS ZUR HYGIENE

1. Ziehen Sie die Schläuche nach jedem Gebrauch vom Vernebler ab. Zerlegen Sie anschließend den Vernebler in seine Einzelteile: Nasenansatzstück, Winkelstück, Verneblerober- und unterteil sowie Düsenaufsatz und Vibrationsaufsatz.

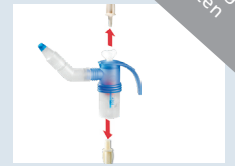

2. Legen Sie alle Einzelteile (außer das PARI SINUS2 Schlauchsystem) ca. 5 Minuten lang in warmes Leitungswasser mit etwas Spülmittel. Spülen Sie alle Einzelteile gründlich mit klarem Wasser nach.



3. Desinfizieren Sie den zerlegten Vernebler und das verwendete Zubehör mindestens einmal wöchentlich. Der PARI SINUS2 Vernebler kann im handelsüblichen thermischen Desinfektionsgerät desinfiziert werden.



Oder Sie legen alle Teile mind. 5 Minuten in kochendes Wasser. Achten Sie darauf, dass alle Teile dabei vollständig mit Wasser bedeckt sind.



4. Lassen Sie die Einzelteile bei Raumtemperatur trocknen.



5. Bewahren Sie nach vollständiger Trocknung die Teile an einem trockenen, staubfreien Ort auf.



6. Luftfilter, Vernebler und Anschlusschlauch sollten jährlich ausgetauscht werden. Diese Bestandteile sind im PARI LC SPRINT SINUS2 Year Pack enthalten, welches im Fachhandel erhältlich ist. Bei gegebenenfalls nicht reinigbarer Verschmutzung oder Beschädigung früher erneuern.

Weitere Informationen
in der Gebrauchsanweisung bitte
unbedingt beachten