

# So inhalieren Sie mit dem **PARI BOY® free**



1

Vor jeder Inhalation gründlich die Hände waschen.



2

Bei Betrieb mit Batterien (bzw. Akkus) diese vor Verneblermontage einsetzen.



3

Medikamentenbehälter bündig auf die Verneblerkammer setzen und Laschen schließen.



4

Vernebler in die Steuerungseinheit stecken (Steckerbereich muss vollständig trocken sein). Lasche an der Unterseite des Geräts schließen.



5

Mundstück bzw. Maske auf den Vernebler stecken.




6

Medikamentendeckel abschrauben. Medikament einfüllen (mind. 2 ml, max. 6 ml). Deckel zuschrauben.



7

Bei Betrieb mit dem Netzteil Steuerungseinheit mit Netzteil und geeigneter Steckdose verbinden.

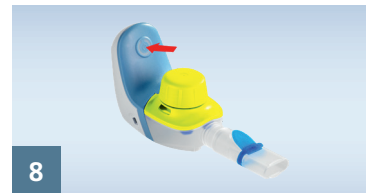

8

Aufrecht und entspannt hinsetzen. Gerät einschalten. Ein Signalton ertönt, die LED der Taste leuchtet grün. Aerosol sammelt sich im Vernebler.




9a

PARI BOY free waagrecht halten. Mundstück zwischen die Zähne nehmen und mit den Lippen umschließen.




9b

PARI BOY free waagrecht halten. Maske muss dicht sitzen.

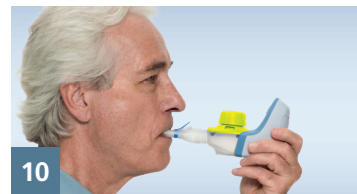

10

Langsam und tief das im Vernebler gesammelte Aerosol ein- und ausatmen. Inhalation kann beendet werden, sobald kein Aerosol mehr am Ventil austritt.

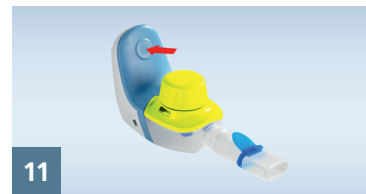

11

Gerät ausschalten. Ein Signalton ertönt, die LED der Taste erlischt. Eine Restmenge an Medikament verbleibt bewusst im Vernebler.



12

Bei Betrieb mit dem Netzteil: Zur vollständigen Trennung vom Netz Netzstecker ziehen.

## Gerätesignale

Einschalten des Geräts:	LED leuchtet grün auf.	1 Piepton.
Während des Betriebs:	LED leuchtet grün.	
Niedriger Batteriestand:	LED blinkt grün.	
Batterie leer/zu niedrige Spannung:	LED blinkt dreimal orange.	1 Piepton. Das Gerät wird automatisch abgeschaltet.
Der Vernebler ist nicht mit der Steuerungseinheit verbunden:	LED blinkt dreimal orange.	Das Gerät wird automatisch abgeschaltet.
Die max. Betriebsdauer von 15 Min. ist überschritten:	LED blinkt dreimal grün.	1 Piepton. Das Gerät wird automatisch abgeschaltet.
Ausschalten des Geräts:	LED erlischt.	1 Piepton.

**Bitte beachten Sie auf jeden Fall die Gebrauchsanweisung des PARI BOY free.** Dort finden Sie eine detaillierte Beschreibung. Diese liegt dem Gerät bei. Bei Verlust kann die jeweilige Gebrauchsanweisung unter [www.pari.com](http://www.pari.com) aufgerufen oder im PARI Service Center unter +49 (0) 8151 279 279 angefordert werden.

# Hygiene und Wartung des **PARI BOY® free**

Achten Sie darauf, dass der Steckerbereich an Vernebler und Steuerungseinheit vor dem erneuten Einsatz vollständig getrocknet ist, da das Gerät sonst nicht vernebelt.

Dauert die Inhalation länger als gewöhnlich, könnte der Aerosolerzeuger verstopft sein. Spülen Sie ihn mit der PARI BOY free Membranreinigungshilfe.



1

## Reinigung

vor erster Inbetriebnahme und nach jedem Gebrauch:

- Vernebler (zerlegt in Einzelteile), Mundstück und Maske ca. 5 Min. in warmes Leitungswasser mit etwas Spülmittel legen.
- Einzelteile gründlich unter fließendem Wasser nachspülen.



2a

## Spülen des Aerosolerzeugers mit PARI BOY free Membranreinigungshilfe


einmal wöchentlich bei 1x täglicher Inhalation

Medikamentenbehälter mit Öffnung nach unten (blaue Ventillügel befinden sich oben) in PARI BOY free Membranreinigungshilfe einsetzen, zuklappen und Laschen schließen.



2b

- PARI BOY free Membranreinigungshilfe an Steuerungseinheit stecken. Lasche an der Unterseite des Geräts schließen.
- 2,5 ml isotonische Salzlösung oder destilliertes Wasser einfüllen.

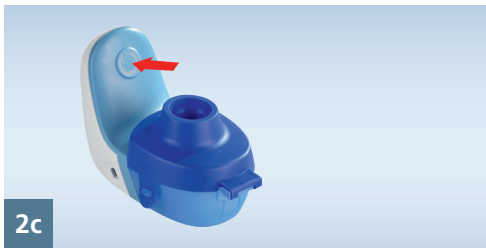

2c

- Bei Betrieb mit dem Netzteil Steuerungseinheit mit Netzteil und Steckdose verbinden.
- PARI BOY free einschalten.  
Ein Signalton ertönt, die LED der Taste leuchtet grün.
- Die Spülung wird durchgeführt.
- Ist die Spülflüssigkeit durchgelaufen, Gerät ausschalten.
- Ein Signalton ertönt, die LED der Taste erlischt.



2d

- Lasche an der Unterseite wieder öffnen (siehe Bild – Es dient nur der Erklärung. Bitte nicht umdrehen, da Restflüssigkeit herauslaufen würde.) PARI BOY free Membranreinigungshilfe von der Steuerungseinheit abziehen.
- PARI BOY free Membranreinigungshilfe von der Steuerungseinheit abziehen.
- Medikamentenbehälter entnehmen, Medikamentenbehälter und PARI BOY free Membranreinigungshilfe gründlich mit Leitungswasser ausspülen.



3

## Desinfektion

- einmal wöchentlich im Anschluss an die Reinigung
- In kochendem, destilliertem Wasser (mind. 5 Min.)
- Oder**
- Im Desinfektionsgerät z. B. für Babyflaschen (mind. 6 Min.)



4

## Trocknung

nach jeder Reinigung und/oder Desinfektion Teile auf eine trockene, saubere und saugfähige Unterlage legen und vollständig trocknen lassen



5

## Aufbewahrung

Teile an einem trockenen, staubfreien Ort aufbewahren



6

## Verneblerwechsel (PARI BOY free Year Pack):

1 x pro Jahr oder nach 365 Anwendungen und 52 Desinfektionen



PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation

Moosstraße 3 · 82319 Starnberg · GERMANY · Tel: +49 (0)8151 279-0 · E-Mail: info@pari.de · www.pari.com

